

ConvaMax™
SUPERABSORBANT

NOUVEAU



Exsudats absorbés
Peau protégée

**Pansement hydrocellulaire
superabsorbant non adhésif**



CONFORMABLE¹



DOUX¹



ABSORPTION ÉLEVÉE^{1,2}



RÉTENTION ÉLEVÉE^{1,2}

ConvaMax™ absorbe efficacement
les exsudats pour maintenir
l'intégrité de la peau et aider
au processus de cicatrisation¹



 **ConvaTec**

NOUVEAU

ConvaMax™ SUPERABSORBANT

Disponible
en 7 tailles
100%
non adhésif



10 x 10 cm
Boîte de 10



12,5 x 12,5 cm
Boîte de 10



20 x 20 cm
Boîte de 10




10 x 20 cm
Boîte de 10



15 x 20 cm
Boîte de 10




20 x 30 cm
Boîte de 10

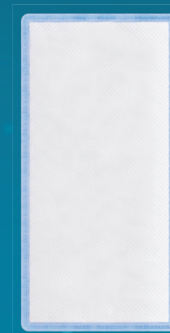


20 x 40 cm
Boîte de 10

Taille de pansement	Boîlage	Référence	Code ACL	Code LPP Individuel
10 x 10 cm	10	422567	3701174001561	6382729
10 x 20 cm	10	422568	3701174001578	6382758
12,5 x 12,5 cm	10	422569	3701174001585	6382735
15 x 20 cm	10	422571	3701174001592	6382764
20 x 20 cm	10	422572	3701174001608	6382741
20 x 30 cm	10	422573	3701174001615	6382787
20 x 40 cm	10	422574	3701174001622	6382787


Mode d'emploi*

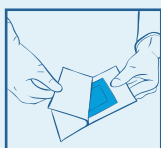

Après avoir nettoyé la plaie, choisir la taille de pansement adaptée à celle-ci en s'assurant qu'il dépasse suffisamment des bords de la plaie.

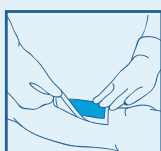

ConvaMax™ peut être utilisé à la fois comme pansement primaire ou pansement secondaire. Lorsqu'il est utilisé comme pansement primaire, ConvaMax™ doit être en contact étroit avec le lit de la plaie afin de s'assurer que l'exsudat est absorbé. La couche blanche devra être au contact de la peau et la couche bleue imperméable à l'eau vers l'extérieur.

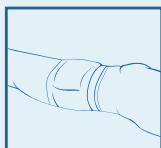

Sécuriser la tenue avec une bande de maintien, du sparadrap ou une bande de compression.

1. Kesteven D. *et al.* In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Data on file, ConvaTec.

2. Kesteven D. *et al.* In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™ & competitor dressings WHRI6021 MS160, Data on file, ConvaTec.

ConvaMax™, pansement hydrocellulaire superabsorbant est un dispositif médical de classe IIb (CEO123), fabriqué par HuizhouForyou Medical Devices Co, Ltd. Il est destiné à la prise en charge des plaies modérément à très exsudatives, ConvaMax™ est remboursable au titre 1^{er}, chapitre 3, section 1, sous-section 1, paragraphe 2.3 de la L.P.P.R dans la catégorie des pansements hydrocellulaires superabsorbants pour la prise en charge des plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement. *Lire attentivement la notice d'instruction du produit avant utilisation.

@/™ sont des marques déposées ConvaTec Inc. © 2020 ConvaTec Inc. Mai 2020.

